

Pro-Tip[®] *TURBO*

pulvérisation

d'air et d'eau
optimale



YOUNG[®]
INNOVATIONS

conçus pour maintenir

l'air et l'eau

séparés

De nombreuses procédures dentaires nécessitent un jet d'air propre et sec instantané. Le Pro-Tip Turbo est doté d'un système exclusif à 2 chambres séparant l'air et l'eau. Cela garantit un jet d'air sec instantané au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. Pro-Tip Turbo aussi produit une brume parfaite à tout moment.



- Jet d'air haute puissance
- Préviens la contamination croisée
- Air sec à tout moment et pulvérisation de brume parfaite
- Système de verrouillage pour sécuriser l'embout
- Séparation hermétique de l'air et de l'eau
- Rigide pour repousser la joue de façon efficace
- Large gamme d'adaptateurs pour une utilisation sur la plupart des seringues

« J'ai utilisé les embouts jetables 3 en 1 pendant plusieurs années sans en être totalement satisfait. Cependant, vous obtenez un jet d'air propre et sec de façon prévisible à chaque fois avec le Pro-Tip Turbo, ce qui est essentiel pour la dentisterie restauratrice adhésive d'aujourd'hui. Le nom « turbo » lui va très bien ; l'air et l'eau sont pulvérisés à haute vitesse. L'adaptateur est facile à installer sur mon système A-dec et la conception à baïonnette prévient l'expulsion des embouts. Ils apportent une grande valeur ajoutée en matière d'instruments jetables. »







Dr. James Robson BDS

Principe de fonctionnement

Pro-Tip[®] TURBO

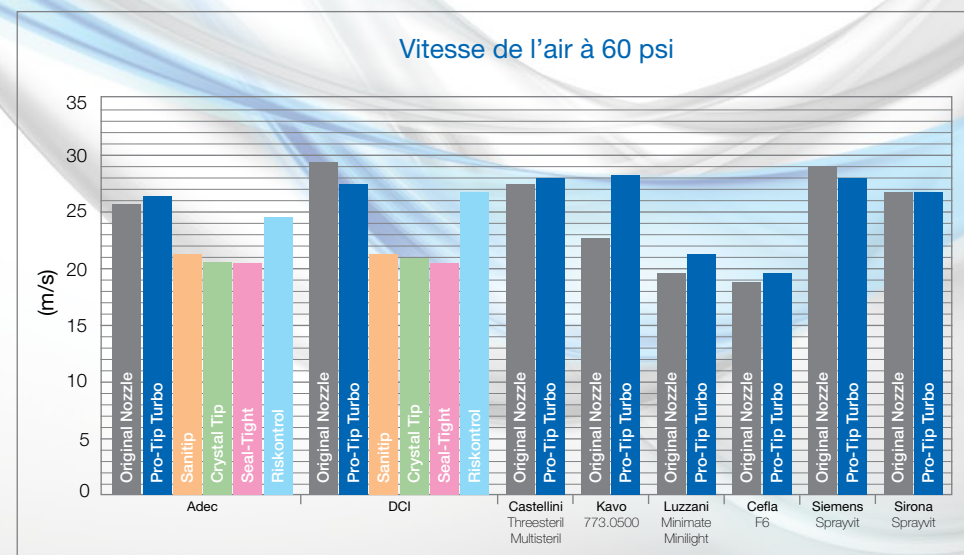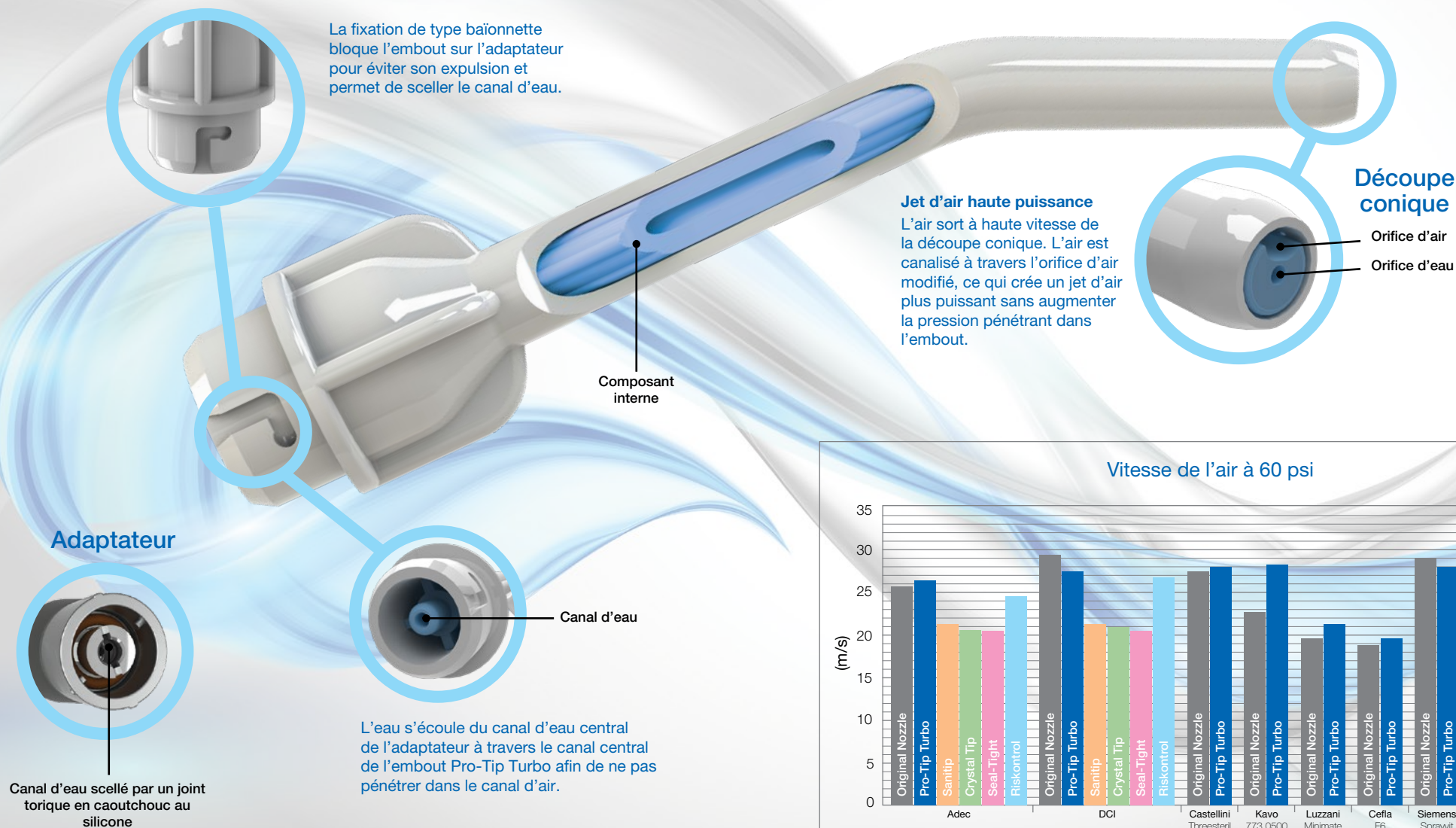


Choisissez un adaptateur compatible avec votre seringue...

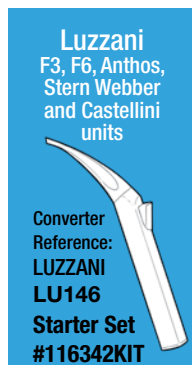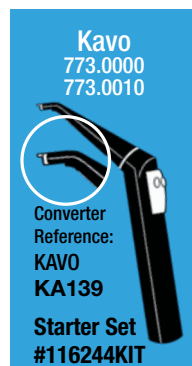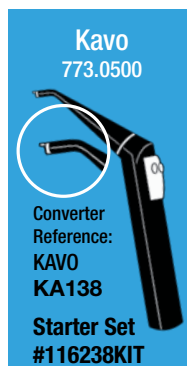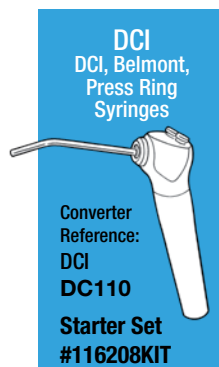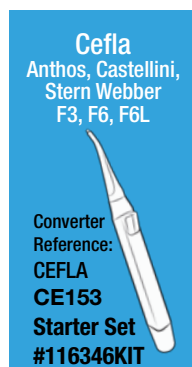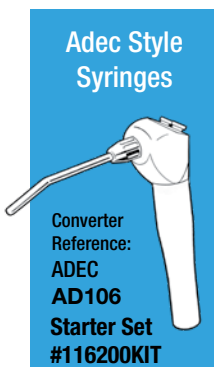

Facile à installer

1. Retirez l'embout de seringue existant et/ou l'adaptateur puis fixez l'adaptateur Pro-Tip sur la seringue
2. Enfoncez l'embout Pro-Tip sur l'adaptateur. Tournez l'embout Pro-Tip tout en maintenant le manchon externe de l'adaptateur afin d'engager l'attache de blocage.
3. L'embout Pro-Tip est fixé de façon sécurisée sur l'adaptateur lorsque les nervures sont alignées.

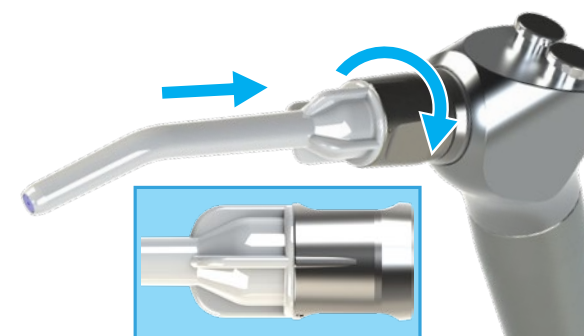

Visitez notre site Internet
www.protipdental.fr
d'adaptateurs et nos vidéos
d'installation.

YOUNG[®]

INNOVATIONS



Young Innovations Europe GmbH

Mittermaierstr. 31 | D-69115 Heidelberg | Allemagne

DE: +49 (0) 6221 4345442 | info@ydnt.eu | www.ydnt.eu

Pour plus d'informations: www.protipdental.fr